

Favor ler cuidadosamente e guardar esta bula para uso futuro.

## CLENS-100<sup>®</sup>

### Gotas Umidificantes

#### **DESCRIÇÃO:**

CLENS-100<sup>®</sup> Gotas Umidificantes é uma solução aquosa, tamponada, isotônica e estéril que contém tampão citrato/borato, cloreto de sódio, com edetato dissódico 0,05% e Polyquad<sup>®</sup> (Poliquaternium-1) 0,001% como conservantes e RLM-100 (ácido carboxílico de lauril éter PEG-11) e Tetronic\* 1304.

#### **AÇÕES:**

CLENS-100 Gotas Umidificantes umidifica suas lentes, reduz o desconforto associado com o uso de lentes de contato e ajuda a remover partículas que podem causar irritação e/ou desconforto.

CLENS-100 Gotas Umidificantes, quando utilizado 4 vezes por dia, ajuda a prevenir o depósito de proteínas em suas lentes.

#### **INDICAÇÕES:**

CLENS-100 Gotas Umidificantes pode ser usado para lubrificar e umidificar diariamente lentes de contato gelatinosas descartáveis e de uso prolongado, bem como lentes rígidas gás-permeáveis, como segue:

- Umidificar as lentes quando necessário durante o dia para reduzir o desconforto.
- Prevenir o acúmulo de depósito de proteínas durante o uso das lentes.

#### **CONTRA-INDICAÇÕES (Razões para não usar):**

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de CLENS-100 não devem utilizar este produto.

#### **INSTRUÇÕES:**

CLENS-100 Gotas Umidificantes pode ser usado ao longo do dia, quando necessário, para aumentar o conforto das lentes.

PARA UMIDIFICAR AS LENTES: Se pequenas irritações, desconforto ou embaçamento ocorrer durante o uso das lentes, instilar 2 gotas em cada olho e piscar 2 ou 3 vezes.

PARA PREVENIR O DEPÓSITO DE PROTEÍNAS EM SUAS LENTES: Instilar 2 gotas em cada olho e piscar 2 ou 3 vezes. Usar até 4 vezes por dia para ajudar a prevenir o acúmulo de depósito de proteínas e resíduos em suas lentes.

### **ADVERTÊNCIAS:**

É essencial seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para seu cuidado, inclusive o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retirar **IMEDIATAMENTE** as lentes e consultar seu oftalmologista.

### **PRECAUÇÕES:**

- Para evitar contaminação não tocar o conta-gotas em nenhuma superfície.
- Tampar após o uso.
- Conservar em temperatura ambiente.
- Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.
- Usar antes da data de validade marcada no produto.
- Descartar o restante da solução após seis meses da abertura do frasco.
- Manter fora do alcance das crianças.

### **APRESENTAÇÕES:**

CLENS-100 Gotas Umidificantes é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 15 ml.

Lote, fabricação e validade: Vide cartucho.

Reg. ANVISA nº 10002390123

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP N° 8066

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. N. S. da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 7077908

sacbrasil@alconlabs.com

\*TETRONIC é um Poloxâmer, marca de BASF Corporation.

© 2003, 2006, 2007

[www.alconlabs.com.br](http://www.alconlabs.com.br)

**ALCON**